

上肢障害者向け Windows®操作支援ユーティリティ ～Windows10 専用～

オペレートナビ TT3.5 は、上肢障害者向け 操作支援ユーティリティソフトウェアです。Windows10 でご利用いただけます。

テンキーやスイッチでアプリケーションの操作を実現します。

●概要

オペレートナビとは、上肢障害などによりマウスやキーボードでのパソコン操作に困難を感じておられる方に、テンキーまたは1個～5個のスイッチ（別売）を使って Windows や各種アプリケーションを操作していただくためのソフトウェアです。

●機能

1. 多様なオンスクリーンキーボード

“かな”、“英数字”、“記号”等の文字入力用や、Internet Explorer 用などアプリケーションの操作キーを登録したオンスクリーンキーボードを用意しています。また、オンスクリーンキーボードのキー配列は変更/追加/削除できます。

2. 障害の状況に合わせてカスタマイズ

使用するスイッチの個数や操作速度、マウスポインタの移動速度などを設定できます。また例えば朝・昼・夜と症状や体調に合わせて、複数の設定情報を保存/呼び出ししたりすることができます。

3. 録音音声や合成音声による意思伝達の基本機能を搭載

音声読み上げ機能を利用して、あらかじめ登録された語句や入力された文を、パソコンで発声するといった意思伝達の基本機能があります。また、あらかじめ録音した音声を登録し、これを再生することも可能です。

4. 語句補完機能


文章の入力時間を短縮するため、過去に入力された語句をもとに、先頭の数字が入力されたときにその文字で始まる語句を候補として表示させることができます。

◆オペレートナビ TT3.5 (TOP3P-C01)

標準価格 76,780 円 (税込・送料別)

パッケージ内容：導入用 CD-ROM、導入ガイド、ライセンス証、
使用許諾書

開発元：テクノツール株式会社

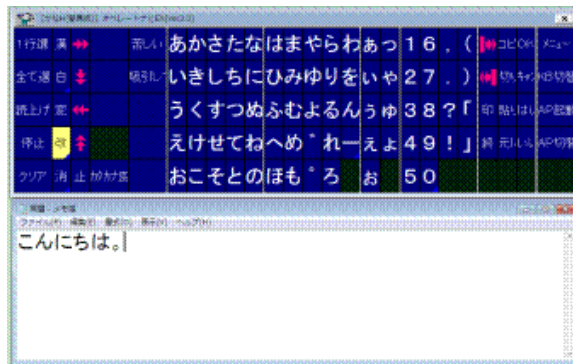

推奨動作環境	
対応 OS	Windows10 Home/Pro(日本語版)(*)1)(*)2)(*)3) Windows10 November 2019 Update バージョン 1909 以降を推奨 デスクトップアプリケーションがインストールできない環境 (Mobile Edition/S モード等) は非対応 ※ご注意-この製品には、Windows8.1 用のオペレートナビ TT2 は、同梱されていません。
日本語入力	Microsoft IME (Windows10 付属)
ハードウェア	上記対応 OS が推奨するパーソナルコンピューター
キーボード	かな入力可能な日本語キーボード(着脱式でも可)(ただし、テンキー入力をする場合はテンキーパッドが必要です)
CPU	上記対応 OS の推奨システム要件に準拠
メモリー	上記対応 OS の推奨システム要件に準拠 (※ただし 32bit 版 OS の場合は 4GB 以上を推奨、64bit 版 OS の場合は 8GB 以上を推奨)
ディスプレイ	解像度 SVGA(800x600)以上を推奨、同時発色数 256 色以上を推奨 (※ただし、テキストサイズ(DPI)は 100%での利用が必要であるため、高解像度のディスプレイやモニターを使用する場合は解像度を低くしても正しく表示できること(画面がぼやけない等)が必要)(マルチモニター(複数台接続表示)には非対応)
ハードディスク	300MB 以上の空きスペース
テキストサイズ (DPI)	100%での利用が必要 (※文字が小さくなりすぎる場合はディスプレイまたはモニターの解像度を低くする等の調整が必要)
ドライブ	CD/DVD ドライブ (導入時に必要)
インターフェース	スイッチコネクタを利用する場合は USB2.0 のポートが1つ以上の空きが必要 (※オペレートナビ TT3.5 ではインターネットを利用したライセンス登録となり、認証用の USB ポートは不要です)
音声出力	対応 OS がサポートするサウンドカード (合成音声等の読み上げ機能に必要)
型番	TOP3P-C01

(*)1) Windows10 のバージョンは スタート画面で「winver」と入力してエンターキーを押すとバージョン情報が表示されます。以前の Windows10 のバージョンの場合は Windows Update を利用して更新してください。
(*)2) 日本語が表示できる設定でも外国語 OS には対応していません。
(*)3) 企業等で高いセキュリティ設定のため、Windows の管理者または標準ユーザーと同等のアクセス権がない場合は、正しく動作しないことがあります。特に下記のフォルダやファイルにアクセス権があることを必ずご確認ください。オペレートナビをインストールした直後に SystemDrive の直下に作成するオペレートナビ Windows システム属性のフォルダおよびファイルに読み取り及び書き込みができること。
%AllUsersProfile%* 以下のフォルダとファイルが読み取り及び書き込みができること。
%AppData%* 以下のフォルダとファイルが読み取り及び書き込みができること。
上記のフォルダについて、パーチャルストアにリダイレクトされる環境の場合、ファイルの残骸が残っていると正しく起動しない場合があります。

＜本製品をお使いいただくために＞

スイッチを使ってオペレートナビ TT3.5 を使用する場合、以下のような機器をご用意(ご購入)いただく必要があります。ご購入に関しては、販売店もしくはテクノツール株式会社までお問い合わせください。

- ・オペレートナビ用スイッチコネクタ(別売)
 - ・または、なんでもワイヤレス(別売)
 - ・スイッチ(別売)
- 障害の状況に合わせてスイッチをご利用ください。

商標について

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。他の会社名、製品名およびサービス等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

お問合せはテクノツール株式会社 営業窓口まで

電話/FAX: 042-370-6377/042-370-6378

メール : office@ttools.co.jp

ホームページ : http://www.ttools.co.jp

〒206-0802 東京都稲城市東長沼 2106-5 マスヤビル 4F

受付時間 : 月曜日から金曜日 10 時~12 時/13 時~17 時

(土日祭日・年末年始などの定休日を除く弊社営業日)

※ 本カタログの内容は 2020 年 7 月時点のものです。